


**QuikRead® FOB/HEMOLEX® Filtration,**  
en vue d'une **recherche de sang dans les selles**  
par le réactif **HEMOLEX® LA**




### Recueillir...

...les selles dans un récipient propre.

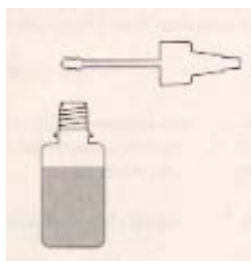


### Dévisser...

...le capuchon du flacon QuikRead® FOB/HEMOLEX® Filtration et dégager la baguette qui y est fixée.

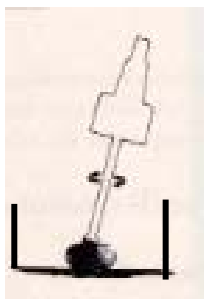

### Prélever...

...en **une seule fois** l'équivalent d'un « **petit pois** » de selles à l'aide de la baguette fixée au bouchon.

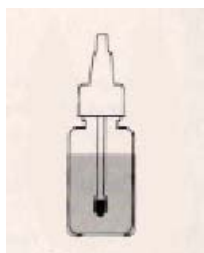

### Introduire ...

...l'échantillon prélevé dans la solution du flacon QuikRead® FOB/HEMOLEX® Filtration et visser le bouchon.

Agiter soigneusement jusqu'à dilution et mise en suspension complète de l'échantillon de selles.

*QuikRead® FOB/HEMOLEX® Filtration :  
flacons de dilution et de filtration  
Réf. : 5154 - 10 flacons de 20 ml*

**Porter le flacon QuikRead® FOB/ Hemolex® Filtration au laboratoire pour réalisation du test le plus rapidement possible**

(si le transport est différé, conserver l'échantillon au réfrigérateur)



**HEMOLEX® LA**, produit ORION, distribué par FUMOUCHE

Fumouze Diagnostics

110-114, rue Victor Hugo – 92686 Levallois-Perret Cedex

Tél : 01 49 68 43 25/41 48 – Fax : 01 49 68 43 22