

LIPOCLEAR

Solution clarifiante

Élimination des lipoprotéines du sérum
par précipitation

LIPOCLEAR - Réf. 4834

Sachet de 10 tubes (préremplis de 0,1 mL de réactif)

Conservation : 12 mois à + 4°C



Mode opératoire

- Laisser le réactif revenir à température ambiante (10 minutes)
- Ajouter 0,5 mL d'échantillon
- Bien agiter
- Laisser le mélange réactif/échantillon reposer pendant 5 minutes
- Centrifuger
- Prélever l'échantillon clarifié et l'analyser selon la méthode habituellement utilisée par le laboratoire

Résultats

Multiplier le résultat par 1,2 pour corriger la dilution