


# STAPH AUREUS FUMOUCZE®

## Mode d'emploi

- ▶ Déposer sur une lame, une goutte de **40 µL** de chaque suspension d'hématies sensibilisées et non sensibilisées

- ▶ Prélever 1 à 5 colonies

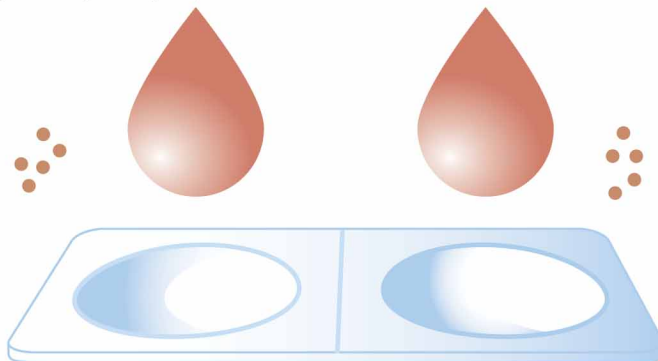

- ▶ Emulsionner les colonies dans chaque goutte d'hématies
- ▶ Observer l'apparition d'une agglutination («clumping») dans les **15 secondes**

## Lecture et interprétation des résultats

Case réactif		Case témoin		Identification
Présence d'agglutination	+	Absence d'agglutination	▶	<i>S. aureus</i>
Absence d'agglutination	+	Absence d'agglutination	▶	Non <i>S. aureus</i>
Présence d'agglutination	+	Présence d'agglutination	▶	Résultat ininterprétable

8 3120 01/R2