


Préparation des réactifs et échantillons (Sérum ou plasma)

1. Reconstitution du réactif RF-PAIA

Reconstituer le réactif RF-PAIA avec 2,0 ml d'eau distillée. Mélanger soigneusement. Laisser reposer au moins 15 minutes avant utilisation. Mélanger soigneusement avant toute utilisation.

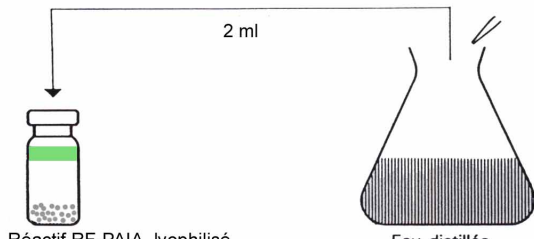


Réactif RF-PAIA, lyophilisé
(Microparticules recouvertes d'IgG humaines)

Stabilité du réactif RF-PAIA reconstitué :
1 mois à +2°C+8°C

2. Préparation de la solution de travail "Réactif RF-PAIA"

Diluer au 1/41 le réactif RF-PAIA reconstitué dans le tampon de réaction RF-PAIA. Ne préparer que le volume nécessaire pour une série (la solution de travail est stable 1 jour à +18...+25°C).

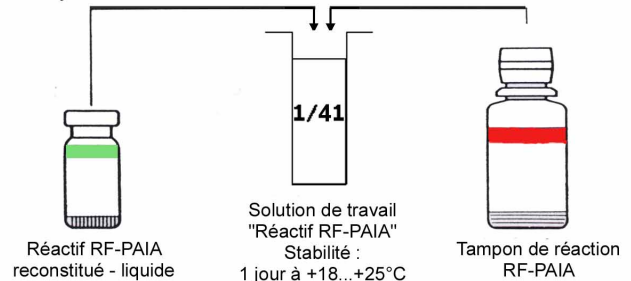


Réactif RF-PAIA reconstitué - liquide

Solution de travail "Réactif RF-PAIA"
Stabilité :
1 jour à +18...+25°C

Tampon de réaction RF-PAIA

3. Dilution du calibrateur : 1/10

Diluer avec du sérum physiologique (NaCl 0,9%) et bien homogénéiser

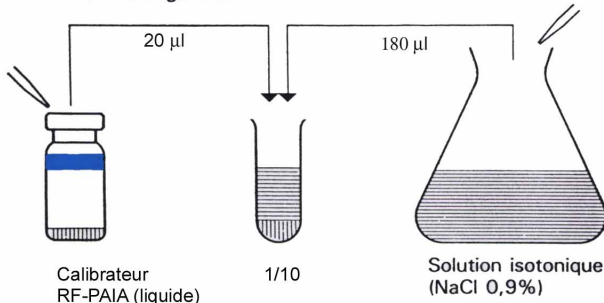


Calibrateur RF-PAIA (liquide)

1/10

Solution isotonique (NaCl 0,9%)

4. Dilution de l'échantillon patient : 1/10

Diluer avec du sérum physiologique (NaCl 0,9%) et bien homogénéiser.

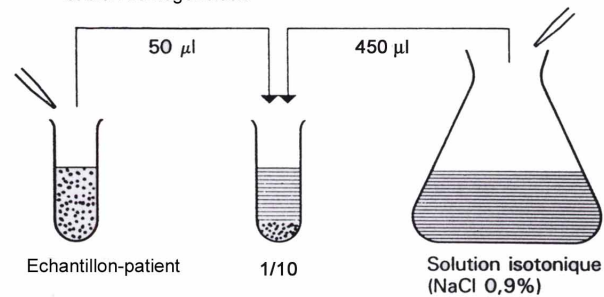


Echantillon-patient

1/10

Solution isotonique (NaCl 0,9%)

Préparation des cuvettes

5. Cuvettes calibrateur

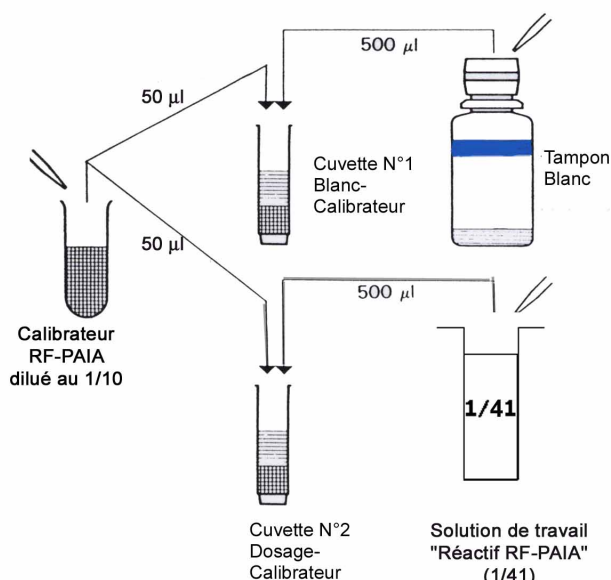

Calibrateur RF-PAIA dilué au 1/10


Cuvette N°1 Blanc-Calibrateur

Tampon Blanc

Cuvette N°2 Dosage-Calibrateur

Solution de travail "Réactif RF-PAIA" (1/41)

6. Cuvettes échantillons

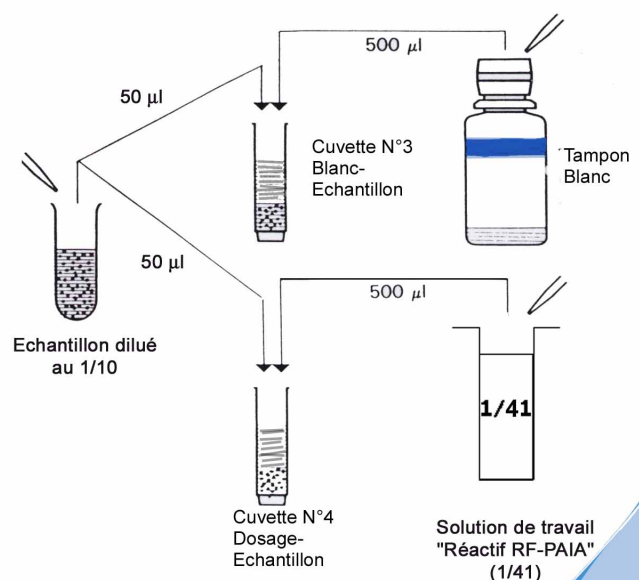

Echantillon dilué au 1/10

Cuvette N°3 Blanc-Echantillon

Tampon Blanc

Cuvette N°4 Dosage-Echantillon

Solution de travail "Réactif RF-PAIA" (1/41)

Homogénéiser le contenu des cuvettes en agitant doucement
Incuber pendant 30 +/- 5 min à température ambiante (+18...+25°C)

7. Dosage

A la fin de la période d'incubation, effectuer les mesures du calibrateur et des échantillons en respectant le mode d'emploi.