


DEPISTAGE DE LA GRIPPE

Le prélèvement

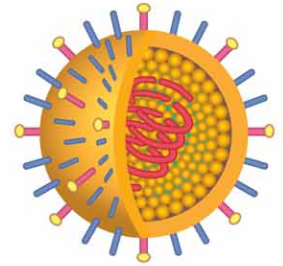

1 Prélèvement par écouvillonnage nasal

- **Insérer** l'écouvillon dans la narine présentant le plus de sécrétions, parallèlement au palais et progresser par rotations douces jusqu'aux cornets.
- **Tourner** plusieurs fois l'écouvillon contre la paroi nasale pour détacher des cellules épithéliales susceptibles de contenir le virus.
- **Retirer** doucement l'écouvillon.

NB : Il est inutile de prélever au niveau de la gorge qui n'est pas tapissée par l'épithélium cilié.

En cas de sécrétions peu abondantes, il est possible de prélever les deux narines avec le même écouvillon.

2 Transmission au laboratoire

- Dès que le prélèvement est effectué, **casser l'écouvillon** (zone de rupture prévue) et déposer l'extrémité dans un tube à hémolyse de 5 mL.
- **Boucher** le tube.
- **Placer le tube au froid** (boîte isotherme).
- **Transmettre** au laboratoire pour réalisation du test dans la journée.

Conditions de transmission au laboratoire

Si le test ne peut pas être réalisé dans la journée, le prélèvement devra être conservé dans le diluant fourni avec le coffret actim™ INFLUENZA (s'adresser au laboratoire).

Dans ce cas, la conservation est de 1,5 mois à +2°C +8°C